


Anleitung zur Nutzung der App

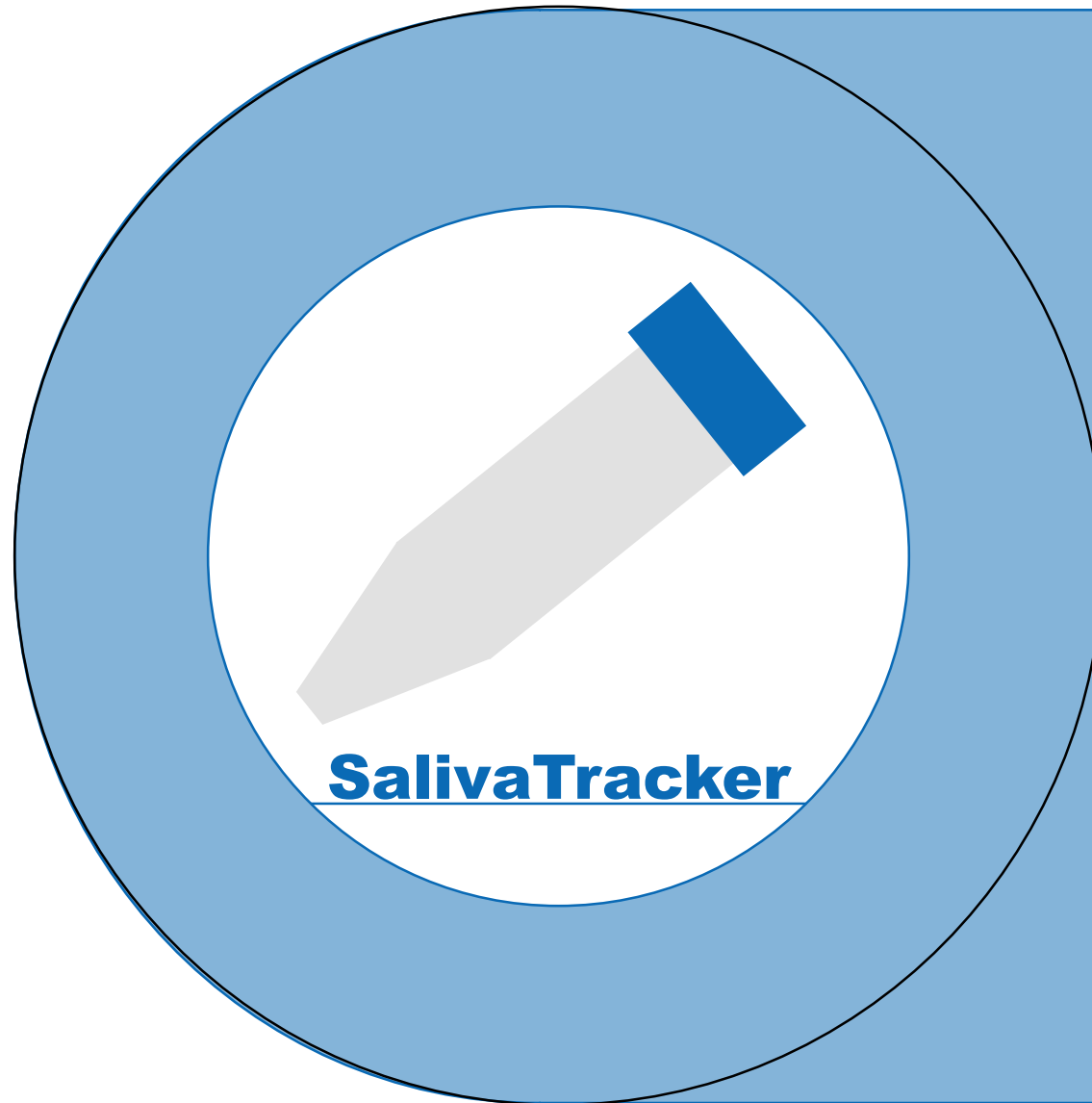

Wichtig!

Bitte verbinden Sie das Handy auf dem die App genutzt wird mit Ihrem WLAN!

Die App braucht während jeder Erfassung von Speichelproben Zugriff zum Internet.



Nur bei erstmaliger
Nutzung der App.


Installation



1. Browser berechtigen unbekannte Apps zu installieren.
2. Mit diesem Browser APK (Dateiformat für Android Apps) aus Email-Anhang herunterladen.
3. Unter Download Doppelklick auf APK machen.
4. Potentiell erscheinen Warnungen auf dem Bildschirm -> „Trotzdem installieren“ drücken.

Nur bei erstmaliger
Nutzung der App.


Probandencode eingeben

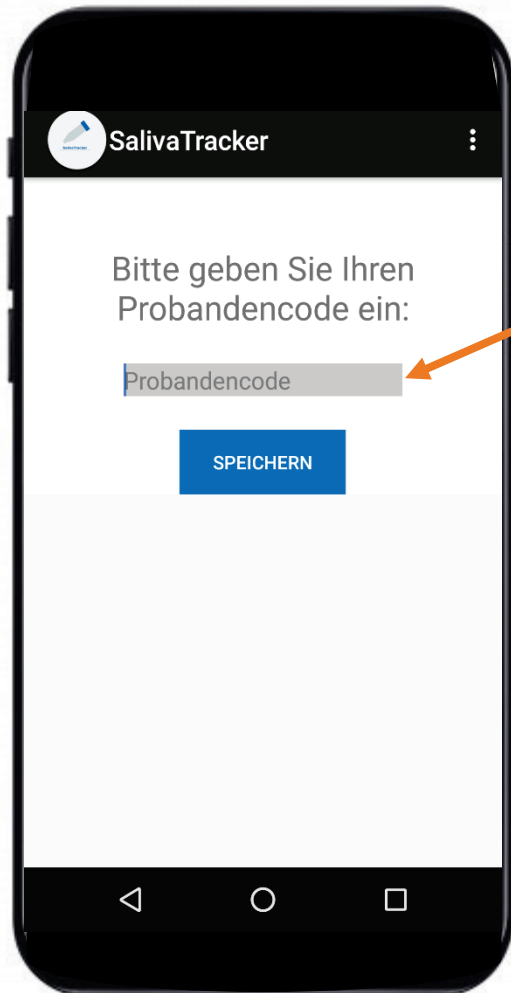

Bitte geben Sie hier Ihren Probandencode ein.

Nur bei erstmaliger Nutzung der App.

Teilnehmercode eingeben

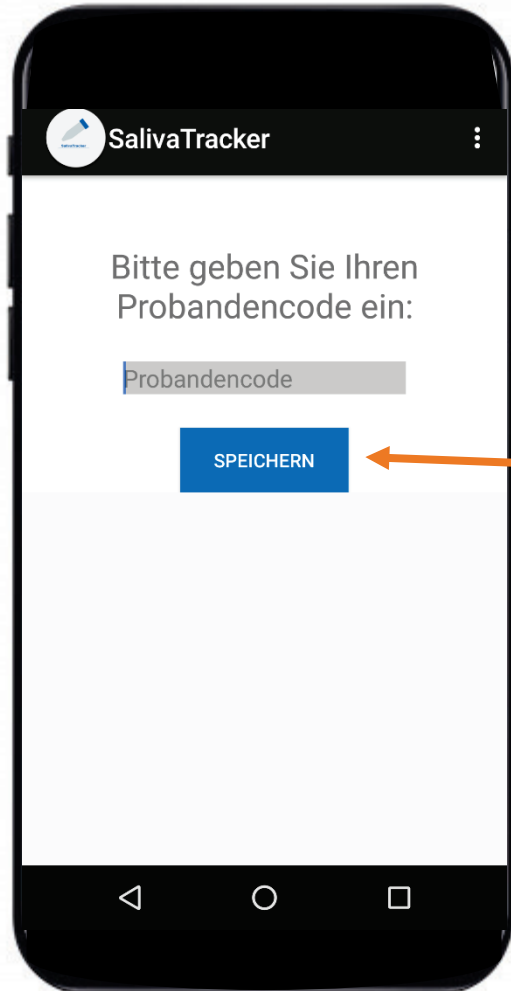

Drücken Sie auf speichern. Dieser Probandencode wird in der App gespeichert und muss nicht erneut eingegeben werden.


Nur bei erstmaliger Nutzung der App.

Startbildschirm



Wenn Sie hier drücken, erhalten Sie weitere Instruktionen und können Ihren Probandencode unter Einstellungen anpassen.

Menü

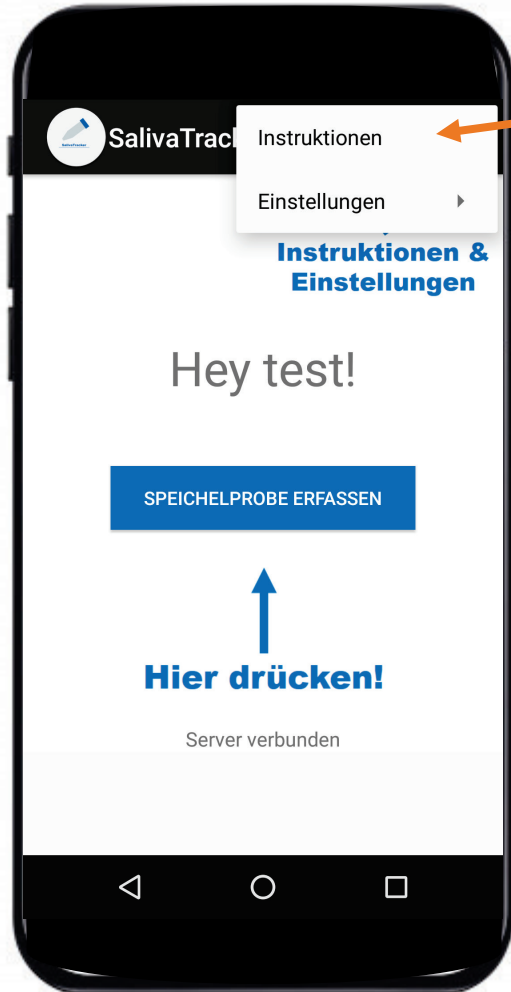

Wenn Sie hier drücken, erhalten Sie weitere Instruktionen zur Nutzung von Salivetten.

Anleitungen




Die Instruktionen werden in Form einer Diashow präsentiert. Durch Klicken auf „Zurück“ gelangen Sie zurück zum Startbildschirm.

Startbildschirm




Mit einem Klick auf „Speichelprobe erfassen“ werden Sie schrittweise durch die Abgabe einer Speichelprobe geleitet.

Speichelprobe erfassen

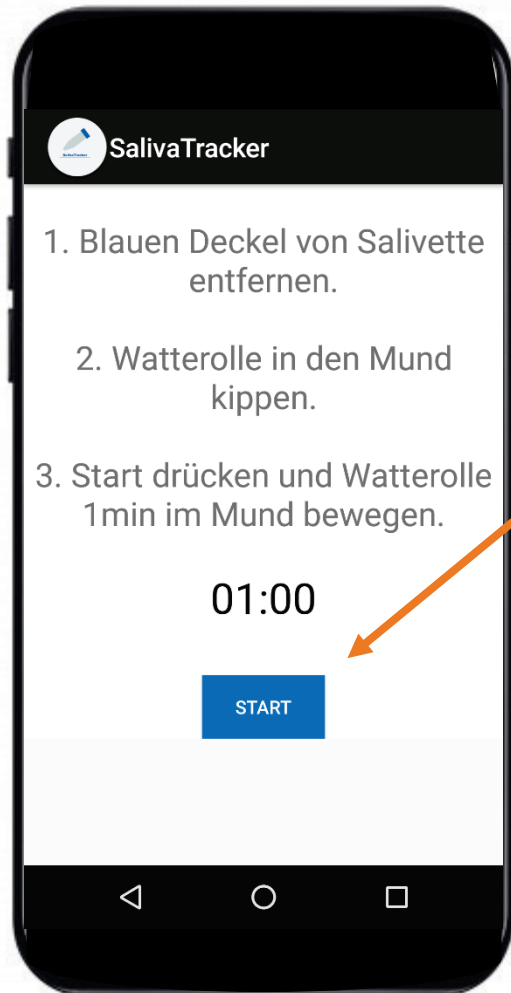


Sobald das Watteröllchen im Mund ist, kann der Timer gestartet werden.

Speichelprobe erfassen

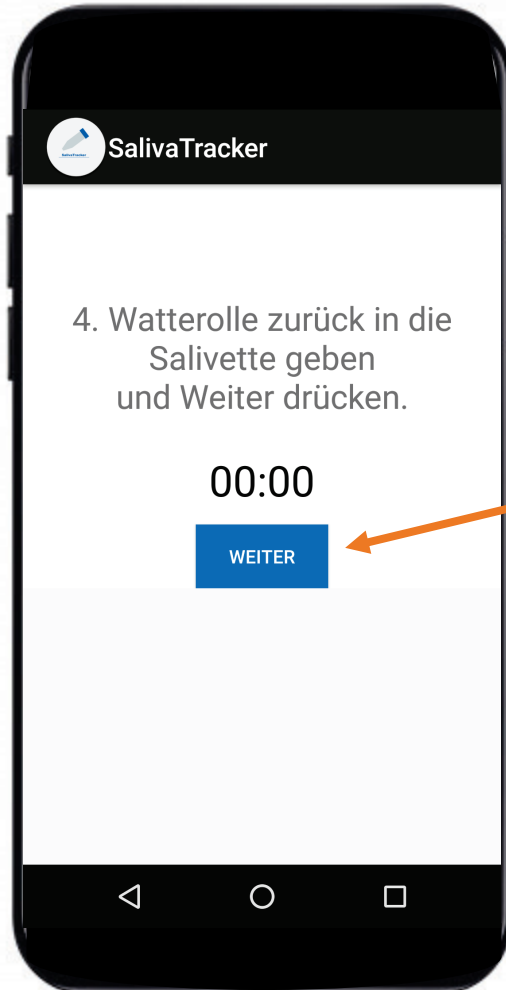


Nach 1 Minute ertönt ein akustisches Signal und die Watterolle kann in die Salivette zurückgegeben werden. Anschließend auf Weiter drücken.

Foto erstellen

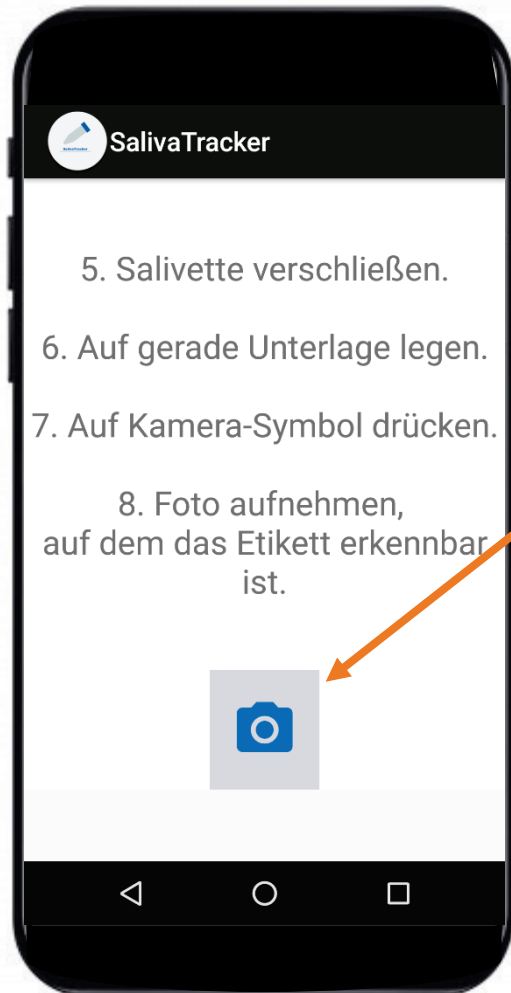

Instruktionen
befolgen und auf das
Kamerasymbol
klicken.


Foto erstellen

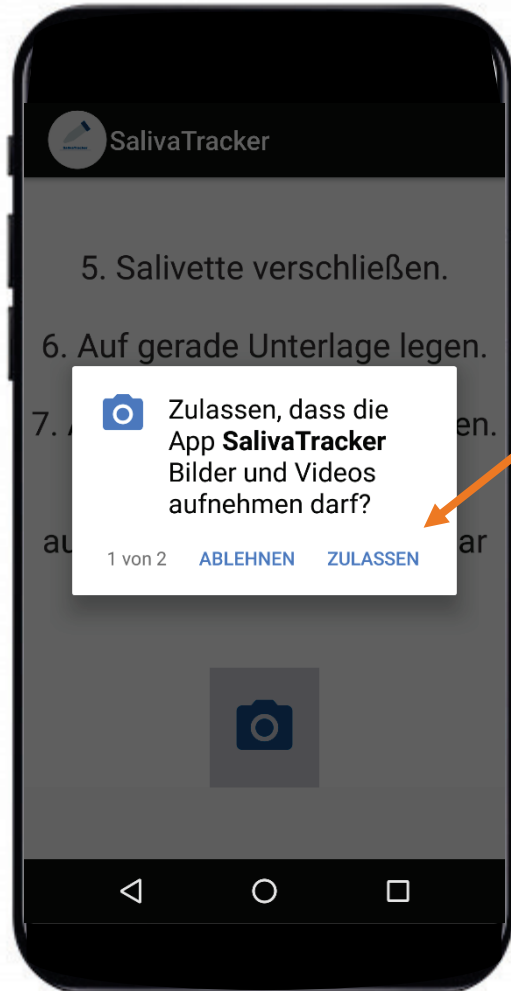

App Zugriff auf
Kamera erlauben.

Nur bei erstmaliger
Nutzung der App.

Foto erstellen

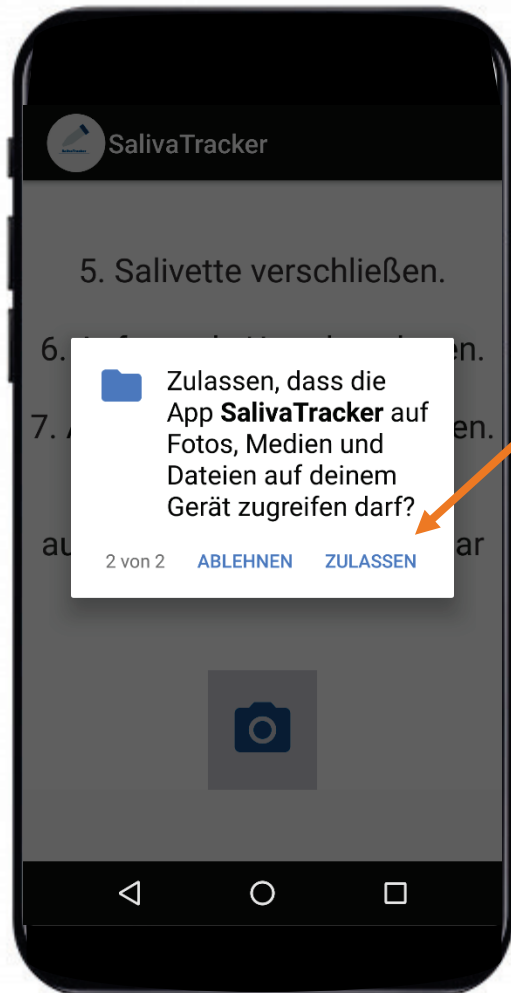

App Zugriff auf
Dateien erlauben.

Nur bei erstmaliger
Nutzung der App.

Foto erstellen



Klick auf das Häkchen bestätigt das Bild. Das Etikette sollte sichtbar sein.

Weiterleitung zu Fragebögen



Bitte auf Start drücken und mit dem Beantworten der Fragen beginnen.