



Evak-Chair aufbauen

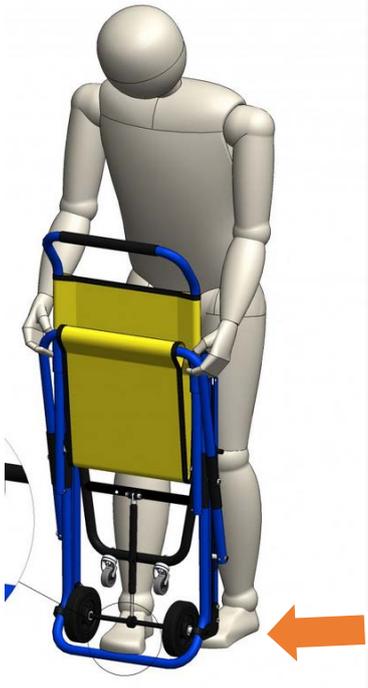

1: Fuß auf den blauen Rahmen stellen damit der Stuhl sicher steht

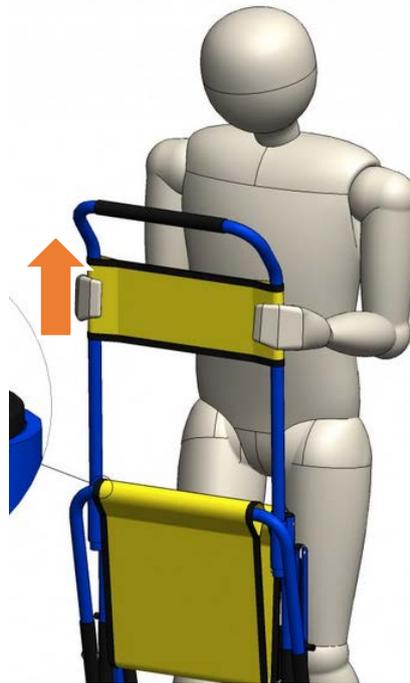


2: das blaue Kopfteil ganz nach oben ziehen bis es einrastet




3: die gelbe Kopfstütze wieder nach unten schieben



4: den Gurt lösen

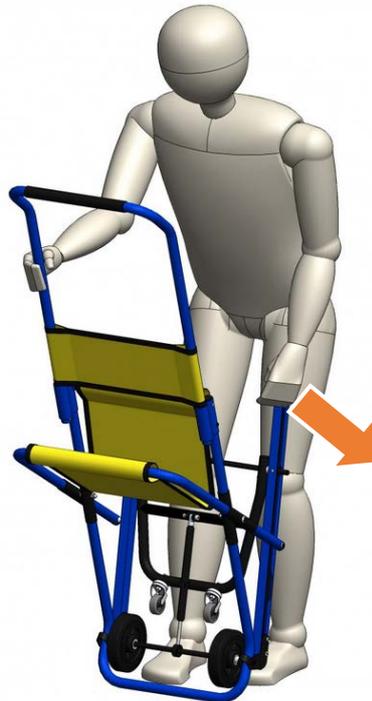

5: die Kufenstange nach unten drücken soweit es geht

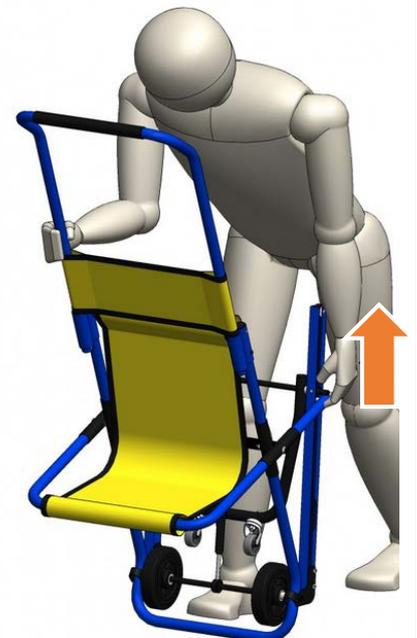

6: die Sitzstange nach oben ziehen bis sie anschlägt

Evak Chair einsetzen



- den Stuhl senkrecht halten und mit einem Fuß auf der untersten Stange gegen das Wegrutschen sichern
- die Person bitten einzusteigen, bzw. von Kollegen/innen beim Einsteigen helfen lassen
- mit der Person absprechen, ob sie angeschnallt werden möchte und ob die Fußstütze ausgeklappt werden soll
- der Person immer erklären, was sie jetzt gerade tun
- den Evak Chair nur so weit nach hinten kippen, bis er auf den Rollen ausbalanciert steht (s.o.) und so zur Treppe fahren
- nicht die zusätzlichen Transportrollen ausfahren !!



- wenn möglich eine/n Kollegen/in bitten, ihnen und dem Stuhl voranzugehen und die Person beruhigen und ihnen ggf. zu helfen
- den Stuhl bewusst und mit ausreichend Schwung über die Kante der obersten Treppenstufe schieben
- dann kontrolliert mit leichtem Druck vertikal nach unten (s.o.) den Abstieg vornehmen
- an einem Treppenabsatz den Stuhl wieder auf die Rollen balancieren und zum nächsten Treppenabsatz fahren
- am Treppenende die zusätzlichen Transportrollen ausklappen und die Person wie in einem Rollstuhl in Sicherheit bringen