

IBEX Chair aufbauen



- den Stuhl aus der Wandhalterung nehmen
- dem Sitz nach vorne klappen und
- den Haltegriff hinten dem Sitz auf die gewünschte Länge einstellen
- !! Immer den Haltegriff höher einstellen wie für einen Rollstuhl, da sonst die Arme auf der Treppe lang werden !!
- Ggf. die Bremswirkung der Gummikette stärker einstellen (Stellrad hinten unten)



- die Person bitten einzusteigen, bzw. von Kollegen/innen beim Einsteigen helfen lassen
- mit der Person absprechen, ob sie angeschnallt werden möchte
- der Person immer erklären, was sie jetzt gerade tun

IBEX Chair einsetzen

Grundsätze:

- **!! immer nur zu zweit arbeiten, der Stuhl ist nicht für eine/n Helfer/in konzipiert !!**
- **die/der Helfer/in oben leitet die Aktionen und kontrolliert das Tempo des Abstieges**
- **die/der Helfer/in unten unterstützt die/den Helfer/in oben**
- **die Helfer/innen sollen immer miteinander kommunizieren**
- **die Bremswirkung der Gummikette kann bei Bedarf über das Stellrad hinten unten verstärkt werden**
- **!! immer nur Stufe für Stufe gehen und kurz pausieren !!**



- **Wie mit einem Rollstuhl auf den Rädern an die oberste Stufe heranfahren**
- **die/der Helfer/in oben schiebt den IbeX Chair und kontrolliert dann durch Halten das gewünschte Tempo des Abstieges;**
- **ggf. nochmals die Länge des oberen Haltebügels anpassen**
- **die/der Helfer/in unten drückt den IbeX Chair immer nach unten, so dass die Gummikette immer Kontakt mit den Stufen hat**
- **Am Treppenende den IbeX Chair wie einen normalen Rollstuhl wegfahren**